

# Richtige Handhabung von Einmal-Mund-Nasen-Schutzmasken

## Anbringen der Mund-Nasen-Schutzmaske:



Hände waschen und/oder desinfizieren



Einmalschutzmaske nur punktuell berühren

Die mit dem Metallbügel bestückte Seite muss sich oben befinden

Die elastischen Gummibänder über die Ohren geben bzw. die offenen Bänder hinter dem Kopf zusammenbinden (je nach Ausführung)



Den Metallbügel in der Mitte leicht biegen und an Nase und Wangen anpassen (muss eng anliegen)



Maske so anpassen, dass sie Nase und Mund vollständig bedeckt und die Unterkante unter dem Kinn sitzt


## Abnahme der Mund-Nasen-Schutzmaske:



**NIEMALS** die Maske vorne angreifen!



Die Elastikbänder von den Ohren herunternehmen bzw. die verknoteten Bänder hinter dem Kopf öffnen oder reißen (je nach Ausführung)

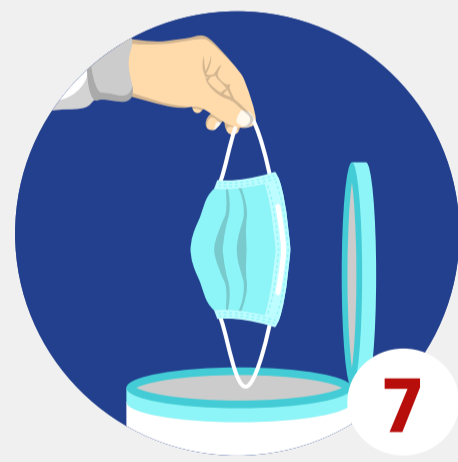

Benutzte Maske in den dafür vorgesehenen Müllsack geben



Nach Abnahme die Hände gründlich waschen und/oder desinfizieren



ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ

*Aus Liebe zum Menschen.*